

# MIYA SICKOFF KIDS

product by miya epoch

## MIYA SICKOFF KIDS


ミヤ シックオフ キッズ

船釣りや、車・バス・フェリー・  
飛行機・電車など  
すべての乗り物旅行に必携!

- ◆突起部の圧力により末梢神経を刺激
- ◆筋肉や身体の痛みを和らげる


### 使用方法と使用上の注意

#### 釣りや乗り物での旅行には

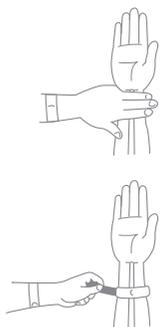

1. 手首の内側の関節より指3本幅(第2関節の幅)の位置で2本の筋(スジ)の間に突起部を当てます。
2. 突起部の位置が押さえる点からずれないように、またきつ過ぎない程度に止めます。
3. 突起部を10~20秒強く押しつけます。それを3回繰り返して下さい。

#### 筋肉や身体の痛みを和らげるには

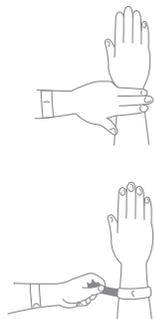



1. 手首の甲側の関節より指3本幅(第2関節の幅)の位置に突起部を当てます。
2. 突起部の位置が押さえる点からずれないように、またきつ過ぎない程度に止めます。
3. 突起部を10~20秒強く押しつけます。それを3回繰り返して下さい。

4. 突起部の圧力により末梢神経を刺激し、効果を発揮します。
5. 万一、その位置で効果がない場合は、突起部の位置を前後左右に少しずらしてお試し下さい。
6. 最も効果的な使用法は両手首にお付けいただくことですが、片手首のみご使用の場合は、右手にお付け下さい。
7. 激しい動作をされる時、また不必要な時にはご使用をお控え下さい。

(注) 1. 前夜の深酒・睡眠不足・体調不良などの場合にはご使用されても効果がありません。  
2. 効果については個人差があります。

# ミヤ シックオフ キッズ(子供用) 巻きつけ方法

## 【A: 大人の方が子供の手首に巻きつける場合】

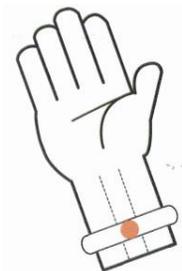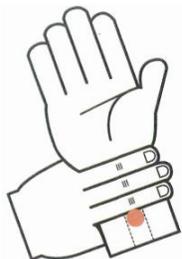

1. 手首の内側の関節より指3本幅(第2関節の幅)の位置で2本の筋(スジ)の間に突起部をあてます。
2. 突起部の位置が押さえる点からずれないように、またきつ過ぎない程度にとめます。  
(子供の手首に合った位置の丸玉まで引っ張って下さい。)
3. 突起部を10~20秒強く押しつけます。  
それを3回繰り返して下さい。
4. 突起部の圧力により末梢神経を刺激し、効果を発揮します。
5. 万一、その位置で効果が無い場合は、突起部の位置を前後左右に少しずつらしてお試し下さい。
6. 最も効果的な使用法は両手首にお付けいただくことですが、片手首のみご使用の場合は、右手にお付け下さい。
7. 激しい動作をされる時、また不必要な時にはご使用をお控え下さい。

## 【B: 手を差し込み手首に巻きつける場合】



1. 本体の先端(楕円部)を小判穴に通す。
2. 本体の輪の中に手を差し込む。
3. 手首の内側の関節より指3本幅(第2関節の幅)の位置で2本の筋(スジ)の間に突起部をあてます。
4. 突起部の位置が押さえる点からずれないように、またきつ過ぎない程度にとめます。  
(子供の手首に合った位置の丸玉まで引っ張って下さい。)



## 【C: 先端(楕円部)を切って手首に巻きつける場合】



1. 本体の先端(楕円部)の根元をはさみで切る。  
(先端を切ると小判穴に入れやすくなります。)
2. 手首の内側の関節より指3本幅(第2関節の幅)の位置で2本の筋(スジ)の間に突起部をあてます。
3. 突起部の位置が押さえる点からずれないように、またきつ過ぎない程度にとめます。  
(子供の手首に合った位置の丸玉まで引っ張って下さい。)

## 【本体形状】

小判穴

丸玉

先端(楕円部)



## 【材質】

シリコーンゴム

## 【使用上の注意】

1. 強く締めすぎないで下さい。皮膚に何らかの異常が見られる場合は使用しないで下さい。
2. 無理に引っ張るなどの乱暴な扱いはお避け下さい。破損するおそれがあります。

発 売 元 : 株式会社ミヤマエ  
住 所 : 〒577-0023  
大阪府東大阪市荒本1丁目2番32号  
T E L : 06-6782-1010(代)